

“科特威爾登”精彩混成複合樹脂
“COLTENE/WHALEDENT” Brilliant Everglow
Universal Submicron Hybrid Composite

衛部醫器輸字第 033003 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號

Brilliant Everglow

Brilliant Everglow Flow

產品敘述

Brilliant Everglow

本產品含有高填料粒子，放射線不透射性的通用 submicron 複合樹脂。目前有通用，半透明和不透明等色調。

Brilliant Everglow Flow

本產品是可流動放射線不透性的 submicron 複合樹脂，有多種色調可供選擇。

適應症

Brilliant Everglow

色調 Bleach (BL) , A1 / B1 , A2 / B2 , A3 / D3 , A3,5 / B3 , C2 / C3 和 A4 / C4
適用於：

- 直接填充 I , II , III , IV 和 V 類窩洞
- 陶瓷和複合修復體的封黏和修復 (例如 COMPONEER)

半透明色調 Translucent (Trans) 和 Bleach Translucent (BL Trans) 適用於：

- 形狀和顏色校正，以增加美觀
- 重建切端
- 陶瓷和複合修復體的封黏和修復 (例如 COMPONEER)

不透明色調 Opaque Bleach (OBL) , Opaque A1 (OA1) 和 Opaque A3 (OA3)

適用於：

- 美觀校正 (例如飽和度偏差)
- 遮蓋暗色區域
- 形成牙本質冠心

Brilliant Everglow Flow

通用和半透明色調適用於：

- V 級窩洞的直接復形（齒頸部齲齒，牙根腐蝕，楔形缺損）
- 前牙區域的填充（III 級和 IV 級窩洞）
- 各級窩洞的小範圍填充（不含咬合面承受）
- 倒凹添補
- 配合精度和透光性，使用黏著劑封黏複合樹脂和陶瓷的間接修復體
- 複合修復體的直接和間接修復
- 預防性樹脂修復
- 窩洞墊底

不透明色調適用於：

- 美觀校正（例如飽和度偏差）
- 遮蓋暗色區域

注意：遮蔽能力由塗層厚度控制。為了獲得最佳混合效果，建議降低不透明層的整體塗層厚度，並使用通用色調覆蓋。

成分及規格

甲基丙烯酸酯

牙科用玻璃

非晶形矽土

氧化鋅

規格	Brilliant Everglow	Brilliant Everglow Flow
填料粒子尺寸範圍	0.02-1.5µm	0.02-1.5µm
無機填充物容積比	56%	37%
無機填充物重量比	74%	60%

禁忌症

對本產品成分過敏或口腔衛生不佳的患者，在應用和固化過程中無法保持工作區域乾燥。

副作用

沒有已知的全身性副作用。在極少數病例中有報導與具有相似成分產品的接觸性過敏。

交互作用

含有丁香油酚的試劑可能會影響複合材料的聚合。因此，應避免同時使用氧化鋅丁香油酚黏合劑與本產品。使用陽離子式漱口水，牙菌斑顯示劑或含氟己定的漱口水時可能會出現牙齒失色現象。

注意事項

1. 本產品必須逐層固化。不要去除抑制層，因為這會影響層之間的黏著力。如果光照不足，則存在固化不足的風險。
2. 本產品對光源敏感。避免持續暴露在直射陽光下，尤其是操作和/或陽光下。
3. 如果直接接觸口腔粘膜，只需用水沖洗即可。在接觸眼睛的情況下，用水徹底沖洗（10 分鐘）並諮詢眼科醫生。
4. 僅提供給牙醫和牙技師或按照他們的指示下操作。將產品放在兒童接觸不到的地方！注射頭僅供單一患者使用。使用後請蓋回注射器的蓋頭。
5. 當使用於直接修復時，基於衛生原因，注射頭僅供單一患者使用。使用後蓋回注射器。為避免材料持續流動，請回拉柱塞。
6. 將此設備限制為由牙醫或按照牙醫的指示販售

儲存方式

儲存在 4-23°C / 39-73°F 下，並避免陽光直射或放置受熱源的環境下。

型號

BRILLIANT EverGlow Kits	
<Trial Kits>	
60019720 4 syringes x 3g	A2/B2 x 1, A3/D3 x 1, A3.5/B3 x1, translucent x 1
60019721 32 tips x 0.2g	A2/B2 x 8, A3/D3 x 8, A3.5/B3 x8, translucent x 8
<Anterior Kits>	
60019724 4 syringes x 3g	BLx1,A1/B1x1,BL Translucentx1,Translucentx1
60019725 32 tips x 0.2g	BLx8,A1/B1x8,BL Translucentx8 ,Translucentx8
<System Kits>	
60019722 9 syringes x 3g	BLx1,A1/B1x1,A2/B2x1,A3/D3x1,A3.5/B3x1, C2/C3x1,A4/C4x1,BL Translucentx1 ,Translucentx1
60019723 60 tips x 0.2g	BLx5,A1/B1x8,A2/B2x8,A3/D3x8,A3.5/B3x8, C2/C3x5,A4/C4x5,BL Translucentx5 ,Translucentx8
<Regular Kits>	
60019726 9 syringes x 3g	OA1x1,OA3 x1,A1/B1 x1,A2/B2 x1,A3/D3 x2, A3.5/B3x1,C2/C3 x1,Translucent x1
60019727 60 tips x 0.2g	OA1 x5,OA3 x5,A1/B1 x5,A2/B2 x10,A3/D3 x12, A3.5/B3 x10,C2/C3 x5,Translucentx8

Kit accessories: instruction for use, mixing pad, shade guide

BRILLIANT EverGlowRefill tips (20x 0.2 g)			
60019746	Opaque Bleach(OBL)	60019747	Opaque A1 (OA1)
60019748	Opaque A3 (OA3)	60019706	Bleach (BL)
60019707	A1 / B1	60019708	A2 / B2
60019709	A3 / D3	60019710	A3.5 / B3
60019716	C2 / C3	60019717	A4 / C4
60019718	Translucent (Trans)	60019719	Bleach Translucent (BL Trans)
BRILLIANT EverGlowRefill syringes(1x3 g)			
60019743	Opaque Bleach (OBL)	60019744	Opaque A1 (OA1)
60019745	Opaque A3 (OA3)	60019697	Bleach (BL)
60019698	A1 / B1	60019699	A2 / B2
60019700	A3 / D3	60019701	A3.5 / B3
60019702	C2 / C3	60019703	A4 / C4
60019704	Translucent (Trans)	60019705	Bleach Translucent (BL Trans)

BRILLIANT EverGlow Flow Intro Kit		
60019760	4 syringes x 2g	A1/B1 x 1, A2/B2 x1, A3/D3 x 1, A3.5/B3 x1,
(kit accessories: instruction for use, mixing pad, 40 application needles)		

BRILLIANT EverGlowFlow Refill (1 x 2 g + 10 application needles)			
60019751	Opaque A2 (OA2)	60019752	Bleach (BL)
60019753	A1 / B1	60019754	A2 / B2
60019755	A3 / D3	60019756	A3.5 / B3
60019757	A4 / C4	60019758	Translucent (Trans)

8469	20 application needles standard (0.8mm)
60022137	20 application needles fine (0.4mm)

製造廠名稱:Coltène/Whaledent AG

製造廠地址: Feldwiesenstrasse 20,9450 Altstätten,Switzerland

藥商名稱: 理維醫材有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)