

“康特”酷填暫時性牙冠牙橋樹脂

“Coltène” Cool Temp Natural

衛署醫器輸字第 020493 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

定義

本產品以匣式包裝，為兩種成分自動混合樹脂。

用途

暫時性牙冠及牙橋修復。

適用於所有的修復技術：在印模後直接臨床製作、以模型製作或在技工所製作。

禁忌症

對本產品中任何成份過敏者請勿使用。

副作用

無發生全身性副作用的案例，某些特例患者在接觸成份類似的產品時，有導致敏感反應之情況。

警告及注意事項

- ◆ 建議暫時性的修復分成區塊執行（如：分成 2-3 個暫時性牙橋），以確保全口假牙（分區塊或不分區塊）成品的精準密合。
- ◆ 未硬化的產品可以酒精去除。
- ◆ **藥劑交互作用**
含有丁香酚或丁香油的藥劑可能會影響本產品的聚合作用。
- ◆ **緊急措施**
若有不小心吞入的狀況，因為材料量非常少及材料無毒性，不會造成為害身體的危險。若直接接觸口腔粘膜，只要用清水沖洗即可，直接接觸眼睛也是先用清水沖洗，然後會診眼科醫師並提供本使用說明書。（清水沖洗 10 分鐘）
- ◆ 呈色於硬化後 15 分鐘達到穩定。因為口中溫度與操作台上的差異，產品硬化速率也因此不同。請勿以操作台上產品硬化的時間來判讀產品於口中硬化的時間。
- ◆ 未硬化的產品可以酒精去除。
- ◆ 初次使用卡匣，請先取下蓋子。
- ◆ 避免幼童接觸。
- ◆ 超過保存期限請勿使用。
- ◆ 本劑僅供牙醫師及牙科技師使用，或在他們的指導下使用。

型號及規格

Cartridges

5800	Cool Temp Start Kit	
	Cool Temp cartridge, A2, A3.5	2 x 50 ml
	MT/BLEU/CLEAR/WHITE/77/P*	20 pcs.
	SYNERGY D6 Flow A2/B2	1 x 2.3 g
5805	Cool Temp Single Pack	
	Cool Temp cartridge A2	1 x 50 ml
5810	Cool Temp Single Pack	
	Cool Temp cartridge A3.5	1 x 50 ml
5815	Cool Temp Single Pack	
	Cool Temp cartridge A1	1 x 50 ml

Syringes

5820	Cool Temp syringe Refill	
	Cool Temp syringe A1	2 x 5 ml
5824	Cool Temp syringe Refill	
	Cool Temp syringe A2	2 x 5 ml
5825	Cool Temp syringe Refill	
	Cool Temp syringe A3.5	2 x 5 ml

附件

6900	Dispenser 50/75 ml	1 支
7774	MT/BLEU/CLEAR/WHITE/77/P*	40 支
6748	MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*	40 支
6749	MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/WITH OT*	40 支
7235	Coltène Separator, intra-oral	1 x 5 mL

* MT = Mixing Tip, OT = Oral Tip

製造廠名稱：Coltène/Whaledent AG

製造廠地址：Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten, Switzerland

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：臺北縣三重市興德路 111 之 8 號 13 樓