

可托索 暫時封填材

Coltosol F Temporary Filling Material

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

產品型號規格

本產品為膏狀，於注射筒及玻璃罐中。

5930 Coltosol F	5 syringes of 8 g each
5906 Coltosol F Single pack	1 glass jar of 38 g
5911 Coltosol F Eco Pack	3 jars of 38 g each

產品敘述

本產品為化學性硬化、放射線阻透之窩洞暫時封填材。成分為氧化鋅／磷酸鋅基底之暫時封填材（設計為最多1-2週的填補）。

產品用途

- 暫時封填第 I、II 級窩洞
- 根管治療之暫時封填

禁忌症

- 對本產品的任一成分有過敏史者。
- 暫時封填活體牙齒超過 2 週者。
- 暫時封填多處窩洞或封填低於牙齦者。

副作用

本產品藉由吸收水分硬化。活體牙齒在牙髓腔中缺水會造成暫時性的疼痛。因此在使用本產品前，請先噴水保持濕潤。本產品硬化時會膨脹，可提供良好的邊緣封填作用。但若琺瑯質過薄可能會因此而破裂。

注意事項

- 只能由牙醫師使用。
- 避免兒童接觸！
- 過期產品請勿使用。
- 使用後，請將瓶蓋轉緊或注射筒螺旋推進軸迴轉一至兩圈，再蓋上蓋子。

本案產品使用方法請參照原廠資料。

製造商名稱：Coltène/Whaledent AG

製造商地址：Feldwiesenstrasse 20, 3450 Altstätten, Switzerland

總商名稱：傑基興業有限公司

總商地址：台北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓