

# “康特” 天普斯第二代 矽膠暫時性封填劑

## “Coltène” TempoSIL 2 Temporary Cement

衛部醫器輸字第 028666 號

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

### 產品敘述

本產品為暫時性、可阻斷輻射線的 A-Silicone 封填劑。有牙本色及白色兩種顏色。

### 成分

Zinc oxide

Polydimethylsiloxane

### 用途

臨時復形體的暫時封填劑

植體支檯體臨時復形體的暫時封填劑

臨時牙冠橋的暫時封填劑

植體支檯體臨時牙冠橋的暫時封填劑

### 臨床操作時間

自動調拌

操作時間 ≤ 0:50 min

硬化時間 ≥ 2:00 min

### 警告及注意事項

A-Silicone 為高生物相容性材質，對患者及牙科操作人員均無有害反應或副作用。

本產品的設計是在口中硬化。

儲存本產品請蓋上 Mixing Tip，可將注射筒開口封住與避免污染。再度使用前將舊 Mixing Tip 移除，擠出本產品檢查材料是否平均被擠出，在換上新的 Mixing Tip。

請戴手套操作。

皮膚分泌物及乳膠手套均會影響 A-Silicone 的硬化，若接觸到材料的表面（牙齒、軟組織等）都需要經過徹底的清潔及沖洗（以清潔劑清洗 15 秒再以水沖洗 15 秒）。或使用不含乳膠的手套。含丁香油、止血劑或某些麻醉劑成分也會影響本產品的硬化。

高溫會加速本產品硬化，反之低溫會減緩本產品硬化。

### 型號及規格

3686	TempoSIL 2 Trial Pack 1 x TempoSIL 2 dentin 5 ml, 1 x TempoSIL 2 white 5 ml, 15 x Mixing Tips Brown long fine
6727	TempoSIL 2 dentin Intro Kit 2 x TempoSIL 2 dentin 5 ml, 15 x Mixing Tips Brown long fine
6729	TempoSIL 2 white Intro Kit 2 x TempoSIL 2 white 5 ml, 15 x Mixing Tips Brown long fine
6728	TempoSIL 2 dentin Refill 4 x TempoSIL 2 dentin 5 ml
6730	TempoSIL 2 white Refill 4 x TempoSIL 2 white 5 ml
6749	Mixing Tips/Oral Tips 40 x Mixing Tip Brown long fine

製造廠名稱：Coltène/Whaledent AG

製造廠地址：Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten, Switzerland

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：新北市三重區興德路 111 之 8 號 13 樓