

“科特威爾登”加成型矽膠印模材料
“COLTENE/WHALEDENT” President the Original A- Silicone Impression Material

衛部醫器輸字第 035360 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

PRESIDENT The Original, putty / putty soft

產品說明

本系列產品是牙科用加成型矽膠印模材料。

適應症

- 修正式印模技術的首次印模
- 同步混合技術的托盤材料
- 矯正模型和基質的印模

材料類型

聚乙烷基矽氧烷、加成型、表面活性矽膠彈性體

putty

底劑：黃色 / 催化劑：淺灰色

- ISO 4823，第 0 型，putty 稠度

putty soft

底劑：棕色 / 催化劑：淺灰色

- ISO 4823，第 0 型，putty 稠度

注意事項

1. 從口腔取出前，檢查印模在口內的固化情況。
2. 高溫加速固化過程，低溫減緩固化過程。
3. 為了延長處理時間，您還可以在使用前把材料放進冰箱。

禁忌症

只要按規定使用產品，無已知的禁忌症。

副作用 / 相互作用

聚乙烷基矽氧烷具有生物相容性。未報告過其對患者和診所人員的有害副作用和相互作用。印模材料預期在患者的口腔中固化。然而，印模材料在口腔中的停留時間不得大於固化時間的兩倍。雖然印模材料具有撕裂強度，但是應注意不把印模材料遺留在牙間隙或溝槽中。如有必要，應提前阻擋明顯的倒凹。

消毒

印模從口腔取出後，應在（冷）流動自來水下進行沖洗。沖洗後，用不影響印模表面或尺寸的適當牙科消毒液進行消毒。應防止丙烯酸托盤吸水。

托盤的清潔

可以用鈍器除去固化的材料。把 Coltene Adhesive 浸於通用溶劑或輕汽油中可以溶解 Coltene Adhesive。溶劑應僅在通風良好區域使用。可以根據常規方法對托盤進行清潔和消毒。

有效期間和儲存

本系列產品在 15 - 23 °C / 59 - 73 °F 和 50 %相對濕度條件下於良好密封容器中，至少在容器上標示的保存期限之前維持預期目的。印模應儲存在正常室溫下。遠離熱源和太陽直射。有效期間 3 年。

根據 ISO 4832 的技術資料

測量值是以 23 °C / 73 °F 室溫和 50 %相對濕度為基礎。

混合時間 (15 ml) : 0:30 min

總工作時間 : 1:10 min

口內固化時間 :

putty / putty soft 3:00 min

混合比基底劑/通用催化劑:

putty 1 ml / 1 ml 1.55 g / 1.51 g

putty soft 1 ml / 1 ml 1.40 g / 1.42 g

型號

Putty		
60019942	PRESIDENT The Original putty	2 x 300 ml, 2 x spoons
60019943	PRESIDENT The Original putty soft	2 x 300 ml, 2 x spoons

製造業者名稱: COLTENE/WHALEDENT AG

製造業者地址: 20 FELDWIESENSTRASSE , 9450 ALTSTATTEN, SWITZERLAND

醫療器材商名稱: 理維醫材有限公司

醫療器材商地址: 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)