

“康特”親和矽膠印模材

“Coltène” Affinis Perfect Impression Materials

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

定義：

牙科臨床上所使用的矽膠基底印模材

用途：

light body

- 基底/薄覆(putty-wash)兩次印模法的第二次精細印模材料。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法的注筒材料。
- 義齒床墊底之印模材料。

regular body

- 單相印模法使用材料。
- 基底/薄覆(putty-wash)兩次印模法的第二次精細印模材料。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法的注筒材料。
- 雙齒列(上下同時)印模法中的印模材。
- 義齒床墊底之印模材料。

heavy body

- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法或二次印模的牙托材料。
- 基底/薄覆(heavy body-wash)兩次印模法的第一次基底印模材料。
- 雙齒列(上下同時)印模法中的牙托用材。
- 全口義齒或局部義齒之印模材料。
- 所有活動義齒床邊緣成形之印模，採用印模罩做人工植牙印模時的印模材。

putty soft / putty super soft

- 基底/薄覆(putty-wash)兩次印模法的第一次基底印模材料。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法的牙托材料。
- 銅圈印模法(copperband impression technique)的牙托材料。
- 研究模、矯正模，活動義齒床製作過程中保護義齒的圍模材。

MonoBody System 360

- 單相印模法或雙齒列印模法使用的印模材。
- 基底/薄覆兩次印模法的第二次精細印模材料。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法或二次印模的牙托材料。
- 義齒床墊底之印模材料。
- 所有牙冠、牙橋、鑄模、轉印及植牙案例（只要傷口癒合即可印模）。

heavybody System 360

- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法或二次印模的牙托材料。
- 基底/薄覆(heavy body-wash)兩次印模法的第一次基底印模材料。
- 雙齒列(上下同時)印模法中的牙托用材。

材料形式：

light body - 低黏稠度

基底材：淡綠色 / 催化劑：白色

- ISO 4823, 第 3 類, 低密度

regular body - 中黏稠度

基底材：淡藍色 / 催化劑：白色

- ISO 4823, 第 2 類, 中密度

heavy body - 高黏稠度

基底材：淡棕色 / 催化劑：焦糖色

- ISO 4823, 第 1 類, 高密度

putty soft

基底材：黃色 / 催化劑：淺灰色

- ISO 4823, 第 0 類, 基底一致

putty super soft

基底材：橙色 / 催化劑：淺灰色

- ISO 4823, 第 0 類, 基底一致

MonoBody System 360

基底材：冰藍色 / 催化劑：淺灰色

- ISO 4823, 第 2 類, 中密度

heavy body System 360

基底材：淺棕色 / 催化劑：焦糖色

- ISO 4823, 第 2 類, 高密度

型號及規格：

Light body / regular body

Light body / regular body - 50/75 System

6501	Light body 2 x 50ml Cartridges, 12 pcs Mixing Tips (yellow/small)
6511	Regular body 2 x 50ml Cartridges, 12 pcs Mixing Tips (yellow/small)

50/75 System 附件

6900	Dispenser 50/75 ml	1 支
6550	Mixing Tips (yellow/small)	40 支
6555	Oral Tips, yellow	100 支

Light body / regular body - microSystem

6500	Light body microSystem 4 x 25ml Cartridges microsystem, 20 pcs Mixing Tips (small), 20 pcs Oral Tips
6510	Regular body microSystem 4 x 25ml Cartridges microsystem, 20 pcs Mixing Tips (medium), 20 pcs Oral Tips

microSystem 附件

6270	Dispenser microSystem	1 支
6214	Mixing Tips, medium	40 支
6215	Mixing Tips, medium	100 支
6202	Mixing Tips, small	40 支
6205	Mixing Tips, small	100 支
6210	Oral Tips	100 支

Heavy body

6520	Heavy Body 75 ml 2 x 75ml Cartridges, 8 pcs Mixing Tips (turquoise/large)
------	--

50/75 System 附件

6900	Dispenser 50/75 ml	1 支
6552	Mixing Tips (turquoise/large)	40 支
6555	Oral Tips, yellow	100 支

Putty soft / putty super soft

6530	Putty soft Base and Catalyst, each 300ml
6535	Putty super soft Base and Catalyst, each 300ml

System 360 MonoBody / heavy body

6487	System 360 heavy body 2 x 300ml Refill package base + 2 x 62ml Refill package Catalyst
6485	System 360 heavy body Starter Kit 1 x 300ml base + 2 x 62ml Catalyst + 1 x Supporting Cartridge + 10 x Dynamic Mixing Tips
6482	MonoBody System 2 x 300ml Refill package base + 2 x 62ml Refill package Catalyst
6480	System 360 MonoBody Starter Kit 1 x 300ml base + 2 x 62ml Catalyst + 1 x Supporting Cartridge + 10 x Dynamic Mixing Tip

System 360 附件

6460	Supporting Cartridge	1 個
6461	Dynamic Mixing Tip	40 支

註銷規程
註銷規程

105 4. 20



製造廠名稱：Coltène/Whaledent AG

製造廠地址：Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten, Switzerland

藥商名稱：傑基興業有限公司

藥商地址：台北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓