

“康特” 捷百 矽膠咬合印模材

“Coltène/Whaledent” JET BITE Dental Impression Material

衛署醫器輸字第 014155 號

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

產品敘述

本產品是牙科臨床上以自動混合裝置使用的矽膠咬合印模材。

材料歸類

ISO 4823, 第 1 類, 高密度

高黏稠度的矽膠材, 成份是聚乙烯矽烷加成式彈性矽膠。

Jet Bite

基本材: 黃色 / 催化劑: 白色

Jet Bite fast

基本材: 淡橙色 / 催化劑: 白色

用途

中心咬合記錄法所用矽膠印模材。

注意

1. 皮膚分泌物及乳膠手套均會影響聚乙烯矽烷的硬化, 只有沖洗乾淨的手或戴上聚乙烯製手套才能接觸牙齒表面、印模區軟組織、排齦線等。另外若接觸到丁香油或止血劑也會影響印模材的硬化, 或使用雙氧水消毒後必須用清水沖洗以免產生氣泡。
2. 請於有效期限前使用。材料匣建議儲存於攝氏 15-23 度(華氏 59-73 度)及相對濕度 50%下。建議垂直放置(將材料匣栓蓋向上)。咬合紀錄後保存於一般室溫, 但應避免曝於熱氣中及日光直射。

型號

6440	Jet Bite microSystem Cartridges Mixing Tips, medium Spreader Tips	4 x 25 ml 20 pcs 20 pcs
6400	Jet Bite 50 ml Cartridges Mixing Tips, pink/medium Spreader Tips	2 x 50 ml 12 pcs 12 pcs
6460	Jet Bite Fast microSystem Cartridges Mixing Tips, medium Spreader Tips	4 x 25 ml 20 pcs 20 pcs
6420	Jet Bite Fast 50 ml Cartridges Mixing Tips, pink/medium Spreader Tips	2 x 50 ml 12 pcs 12 pcs
6214	Mixing Tips, medium	40 pcs
6215	Mixing Tips, medium	100 pcs
6551	Mixing Tips, pink/medium	40 pcs
6223	Spreader Tips	100 pcs
6900	Dispenser 50/75	1 pc

製造廠名稱: COLTÈNE/WHALEDENT AG

製造廠地址: FELDWIENSTRASSE 20, CH-9450 ALTSTÄTTEN, SWITZERLAND

藥商名稱: 傑基興業有限公司

藥商地址: 台北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓