


仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“康特”極速矽膠印模材	申請廠商	傑基興業有限公司
--------	-------------	------	----------

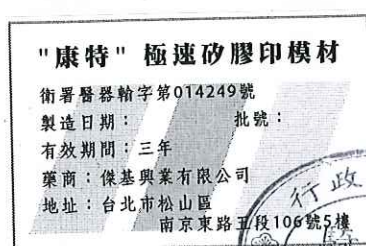

95. 5. 05



註銷規格

105. 4. 20

- ※ 貼產品之標籤仿單或包裝及實物正背面照片
- ※ 中文仿單（如背面所列項目）



coltene®
Speedex
lightbody
surface activated

Art. No 4980

coltene®
Speedex
lightbody
surface activated

Art. No 4980



coltène®
Speedex

medium

surface activated

coltène®
whaledent

Art. No 4986

coltène®
Speedex

medium

coltène®
whaledent

Art. No 4986

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | | Coltène® SPEEDEX medium |
| 1 | | Instructions for use |

ISO 4823, Type 2, medium consistency
Polysiloxane (condensation-type)

140 ml

Art. No 4986

Coltène/Whaledent AG (Manufacturer)
Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00, Fax +41 (0)71 757 53 01, office@coltènewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800, Fax +1 330 916 7077, productinfo@coltènewhaledent.com

Nur für den dentalen Gebrauch. For dental use only. A usage dentaire uniquement.
Solo para uso dental. Solo per utilizzo odontiatrico. Endast för dental bruk.
Enkel voor dentaal gebruik. Kun til dental brug. Για οδοντιατρική χρήση μόνο.
Apenas para uso dentário. Sadece dental kullanm içindir.

Caution:
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.



LOT

coltène®
whaledent



coltène®
whaledent



coltène®
Speedex
medium
surface activated

Art. No 4986

coltène®
Speedex
medium
surface activated

Art. No 4986





Caution:
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.



coltène
Speedex

putty

coltène
whaledent

Art. No 4970

Coltène/Whaledent AG (Manufacturer)
Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00, Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800, Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent

Art. No 4970





coltène® *Speedex* putty

coltène®
whaledent®

Art. No 4970

1	Coltène® SPEEDEX putty
1	Instructions for use

Nur für den dentalen Gebrauch. For dental use only. A usage dentaire uniquement. Solo para uso dental. Solo per utilizzo odontoiatrico. Endast för dentalt bruk. Enkel voor dentaal gebruik. Kun til dentalt brug. Για οδοντιατρική χρήση μόνο. Apenas para uso dentário. Sadece dental kullanımı içindir.

Base 910 ml

ISO 4823, Type 0, putty consistency
Polysiloxane (condensation-type)



g

LOT

65336-11

coltène®
whaledent®





coltène®
Speedex
 putty

coltène //
 whaledent

Art. No 4970



院衛
 縫
 (醫
 勿食品



生
章
5)
/



coltène®

Speedex

putty



B

LOT



ISO 4823, Type 0, putty consistency
Polysiloxane (condensation-type)

910 ml

coltène
whaledent®

63781-AN



“康特” 極速矽膠印模材

“Coltène” Speedex Impression Material

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

產品敘述：

Speedex light body、medium 是牙科臨床上所使用矽膠細部印模材。Speedex putty 是矽膠基底印模材。Speedex Universal Activator 是矽膠印模材的催化劑。用來置于印模牙托上，以複製患者的牙齒和牙齦形狀。

材料形式：

Speedex light body 為低黏稠度印模材，成份是聚矽烷預縮式彈性矽膠。

基底材：深藍色

- ISO 4823, 第 3 類，低密度

Speedex medium 為中黏稠度印模材，成份是聚矽烷預縮式彈性矽膠。

基底材：白色

- ISO 4823, 第 2 類，中密度

Speedex putty 為高黏稠度印模材，成份是聚矽烷預縮式彈性矽膠。

基底材：淺灰色

- ISO 4823, 第 1 類，高密度

Speedex Universal Activator 成份是聚矽烷預縮式彈性矽膠。

催化劑：綠色

用途：

Speedex light body、medium

- 基底/薄覆(putty-wash)兩次印模法的第二次精細印模材料。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法中的注筒材料。
- 一次印模法中的精細印模材料。

Speedex putty

- 基底/薄覆(putty-wash)兩次印模法的第一次基底印模用材。
- 同時調拌術(simultaneous mixing)一次印模法的牙托用材。
- 銅圈印模法的牙托用材。
- 研究模、矯正模的印取，活動義齒床製作過程中保護義齒的圍模材。

Speedex Universal Activator

- Speedex putty (Traymaterial)基底印模法中的牙托用材。
- Speedex light body 與 Speedex medium (Washmaterial)兩次印模法中的第二次基底印模用材。

型號及規格：

4980	Light body surface activated Single-Pack 1 x 140ml
4988	Light body surface activated Single-Pack 1 x 60ml
4986	Speedex medium Single-Pack 1 x 140ml
4970	Putty Single-Pack 1 x 910ml
4990	Universal Activator Single-Pack 1 x 60ml

附件

4410	Coltène Adhesive 1 x 10ml
4414	Coltène Mixing Pad 10 pcs
4415	Coltène Spatula 1 pc
4426	Coltène Impression syringe (with 15 Swivel Tips) 3 pcs
4428	Coltène Refill Swivel Tips 50 pcs

105. 4. 20



註銷規格

製造廠名稱：Coltène/Whaledent AG

製造廠地址：Feldwiesenstrasse 20, 9450 Allstatten, Switzerland

總商名稱：傑基興業有限公司

總商地址：台北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓