

“康特” 派拉可冠心材

“Coltène” ParaCore dual cured core & resin cement

衛部醫器輸字第 025637 號

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

產品敘述

ParaCore 為雙重聚合，X 光不透性的複合冠心材，亦適用於根管牙根柱之黏結及間接鑲復技術。

ParaBond 黏著劑為適用琺瑯質及牙本質之化學聚合、自調理黏著系統。內含 Non-Rinse Conditioner 及化學聚合之黏著劑 (Adhesive A 及 B)。

成份

ParaCore 包含

Methacrylates
Fluoride
Barium glass
Amorphous silica

ParaBond Non-Rinse Conditioner (NRC) 包含

Water
Acrylamidosulfonic acid
Methacrylate

ParaBond Adhesive A 包含

Methacrylates
Maleic acid
Benzoyl peroxide

ParaBond Adhesive B 包含

Ethanol
Water
Initiators

技術資料

填充顆粒平均尺寸： 2 μ m
顆粒尺寸範圍： 0.1-5 μ m
無機填充物容積比例： 約 50%
無機填充物重量比例： 約 68%

用途

- 各種型態的根管牙根柱之永久黏結
- 做為牙根柱之冠心體堆砌成形材料
- 牙冠、牙橋、嵌體及高嵌體（陶瓷、金屬及複合樹脂）的黏結

光聚合時間

全部光聚合時間（鹵素及LED光聚合燈；光強度 > 800 mW/cm²）：厚度 2mm 每面 20 秒。使用強度較低的光源，需要較長的光聚合時間。

完成

ParaCore 一旦光照聚合硬化後便可以開始修磨牙齒。

儲存

本產品必需儲存於冰箱中（4-8 °C / 39-46 °F），並避免暴露於直接日照或其他熱源邊。如預期快速用完，則初次使用後可存放於室溫（23 °C / 73 °F）。

禁忌症

對本產品其中的任何成份會造成過敏現象者禁用；口腔衛生不佳及術區無法完全保持乾燥的狀況下視為使用的禁忌。

副作用

某些體質不佳的患者本案產品成分，有導致敏感反應之情況。

警告及注意事項

- **交互作用**
ParaBond 請勿接觸酚類及氧化鋅丁香油，會抑制其聚合作用
- **操作時間**
本產品操作時間依溫度而定。在 23°C 下的操作時間約為 1 分 20 秒。低溫可延長操作時間，在高溫下會縮短操作時間。
ParaCore 材料對光照敏感，應避免暴露在光照之下過久造成聚合硬化，尤其在診療燈下不得超過 30 秒。

- **緊急處理**
若直接接觸口腔粘膜，只要用清水沖洗即可。直接接觸眼睛也是先用清水沖洗（沖洗 10 分鐘），然後會診眼科醫師。
- 本劑僅供牙醫師及牙科技師使用；應避免幼童接觸；過期產品請勿使用；使用後材料管、瓶應立即蓋好，以免受污染。

型號及規格

ParaCore Syringe

5885	ParaCore 5 ml kit 1 x 5 ml syringe white, 1 x 5 ml syringe dentin, 1 x 5 ml syringe dentin slow, 1 x 5 ml syringe trans slow, 20 Mixing Tips brown short super fine, 3 ml ParaBond Non-Rinse Conditioner, 3 ml ParaBond Adhesive A, 3 ml ParaBond Adhesive B
60013753	ParaCore 5 ml Intro Kit 2 x 5 ml syringe dentin slow, 2 x 5 ml syringe trans slow, 20 Mixing Tips brown short super fine, 3 ml ParaBond Non-Rinse Conditioner, 3 ml ParaBond Adhesive A, 3 ml ParaBond Adhesive B
60011391	ParaCore 5 ml dentin slow refill 2 x 5 ml syringe dentin slow, 20 Mixing Tips brown short super fine
60011392	ParaCore 5 ml trans slow refill 2 x 5 ml syringe trans slow, 20 Mixing Tips brown short super fine

製造廠名稱：Coltène/Whaledent AG

製造廠地址：Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten, Switzerland

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：新北市三重區興德路 111 之 8 號 13 樓