

仿單標籤粘貼

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但
如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者、外文仿單
內容須與核定本之中文仿單內容相符。

產品中文名稱 “德山”快速自凝樹脂

申

“德山”快速自凝樹脂

衛署醫器輸字第 011135 號

製造日期：

製造批號：

保存期限：

製造廠名稱：TOKUYAMA DENTAL CORP
(KASHIMA FACTORY)

製造廠地址：26, SUNAYAMA, KAMISU-SHI,
IBARAKI 314-0255, JAPAN

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容

刊載(市售品須刊載實際地址)

109. 4. 21

109. 4. 21

トクソー
キュアファスト

齒科汎用アクリル系レジ
(管理医療機器)

火氣厳禁

TOKUSO
CUREFAST
QUICK SELF-CURING
ACRYLIC RESIN

アイボリー
IVORY

- 粉末 100g
- 液 100mL
- スポイト 1本
- ラバーカップ 1個
- 粉末計量カップ 1個
- スパチュラ 1本
- 筆 1本

保管条件: 0~25℃

認証番号 21000BZZ00222000

株式会社 トクヤマデンタル
茨城県神栖市砂山26

アイボリー
IVORY

“德山” 快速自凝樹脂 “Tokuyama” Tokuso Curefast

使用前請務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

使用說明書

使用本產品前請詳閱
說明及注意事項

TOKUSO CUREFAST 是快速自凝樹脂，臨床用途廣，包括：臨時牙冠、修補義齒床等。
操作時可採用糊狀加壓塑形法或筆積堆砌法。

《△ 注意事項》

· 本產品僅供牙科醫師使用。

<安全上的注意事項>

- 如果患者對單體樹脂基會產生過敏、皮膚炎的現象，請避免使用本產品。
- 在使用過程中，患者發生過敏現象時，請立即中斷使用，並接受專科醫師治療。
- 請注意！操作本產品時，請穿戴醫療用手套及護目鏡，別讓本產品接觸眼睛及皮膚或附著在衣服上。另外，雖然醫療用手套可以避免直接接觸本產品，但是有部分的有機溶媒/單體樹脂基可能在短時間內滲透手套，因此，如果粉末、液劑或攪拌好的調和物附著在手套上，請直接將手套丟掉，並用肥皂、清水沖洗乾淨。
- 請注意別讓本產品接觸患者的眼睛及皮膚或附著在衣服上。
- 如果不小心讓本產品接觸到眼睛，請用大量的清水沖洗，並接受眼科醫師的治療。如果皮膚接觸到本產品，請用肥皂、清水沖洗乾淨，如果是附著在衣服上，請直接用酒精棉擦拭。
- 在口腔內操作本產品時，請盡量不要接觸口腔黏膜。操作時請避免讓材料流入咽喉。本產品是 X 光不透物所以發生誤吞或吸入時無法找出位置。萬一材料流入咽喉、氣管或食道，請立即接受專科醫師的處置及治療。
- 液劑是可燃物，請不要靠近火焰。
- 為了防止交叉感染，調拌杯、調拌棒及筆等，請清洗後再使用，使用後請用酒精消毒。
- 產品包裝或容器破損的話，請不要再使用。
- 研磨或研削時，請使用吸塵設備及戴上公家機關認證的防塵口罩，請勿吸入粉塵。

<操作上的注意事項>

- 使用本產品時，請適時的換氣。
- 請注意大量的粉末及液劑一起混合的話，會產生高溫。

<儲存上的注意事項>

- 避免陽光直射、高溫潮濕的地方，請放於室溫「0~25℃」的地方。另外請注意包裝上的保存期限。

※

0000-00
年 月

- 粉末、液劑使用後，請將蓋子拴緊。特別是液劑容易揮發，請將蓋子拴緊。
- 如果長時間不使用液劑，請將液劑放置於原本的罐子，請不要將液劑放置滴管內。
- 請將本產品放置小孩拿不到的地方。

<廢棄物處理>

- 處理材料，將粉末與液劑混合一起，而後使其硬化，再丟棄。
- 注意材料聚合時所生之熱氣。



109. 4. 21



《產品特性》

1. 硬化時間只有 3 分鐘(23°C)，節省操作時間。
2. 操作時可採用糊狀加壓塑形法或筆積堆砌法。
3. 調拌時氣泡少，製品結構強勁，持久耐用。
4. 硬度高，研磨切削時不易有碎片卡住研磨器。
5. 聚合硬化後表面光滑細緻，容易拋光打亮。
6. 有刻度的樹脂液吸量管與瓶蓋成一體，操作方便安全，減少污染。

《用途》

1. 修復活動義齒：
 - 1) 延伸義齒床堤緣。
 - 2) 修補破損缺角或斷裂時的義齒床。
 - 3) 修補、固定或替換鬆脫的樹脂牙。
 - 4) 活動義齒上樹脂上樹脂牙咬合的墊高。
2. 製作臨時牙冠牙橋。
3. 製作個別印模托。
4. 其他用途：
 - 1) 暫時固定義齒床鈎環。
 - 2) 當樹脂鑄磨材(可完全 burn out)。

《物理特性》 粉液比(粉/液)=2g/1mL 室溫 23°C

聚合硬化時間(分)	3'30"
硬度(HK)	13.8
撓取強度(Mpa)	86
容易以筆積堆砌	Good
容易調拌	Good

《使用方法》

1. 筆積堆砌法
依一般方法操作。操作中毛筆上沾取的樹脂，盡快用紗布擦拭後再使用。
2. 糊狀加壓塑形法
 - 1) 取定量的液劑於調拌杯中，加入 2 倍量的粉末，再利用調拌棒攪拌 10-15 秒。
標準的粉液比是滴管一刻度的液劑(0.5mL)和量杯一刻度的粉末(1g)。
 - 2) 混合後 20-30 秒為膏狀，最適合作業。
 - 3) 硬化時間從粉液混合後約 2 分鐘，所以在 2 分鐘前完成每個步驟。

《包裝》

1. CureFast kit

· 牙冠色(象牙色)	· 牙肉色(粉紅色)
液劑 100mL ... X 1	液劑 100mL ... X 1
粉末 100g ... X 1	粉末 100g ... X 1
粉末量杯 ... X 1	粉末量杯 ... X 1
液劑滴管 ... X 1	液劑滴管 ... X 1
橡膠混合杯 ... X 1	橡膠混合杯 ... X 1
調拌棒 ... X 1	調拌棒 ... X 1
專用毛筆 ... X 1	專用毛筆 ... X 1

2. CureFast

- 液劑 100mL
- 粉末，粉紅色 100g
- 粉末，象牙色 100g

※ 以上注意事項及要點是根據現有的文獻及報告所制定，如果臨床上有新的發現或主張，本說明書會修正。

製造廠名稱：TOKUYAMA DENTAL CORP (KASHIMA FACTORY)
製造廠地址：26, SUNAYAMA, KAMISU-SHI, IBARAKI 314-0255, JAPAN

藥商名稱：傑基興業股份有限公司
藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)



