

“德山” 巴飛廣用途黏著劑

“TOKUYAMA” PALFIQUE UNIVERSAL BOND

衛部醫器輸字第 031695 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品敘述

1. 本產品是一種雙劑使用，自聚合式牙科黏著劑。適用於利用自酸蝕、部分琺瑯質酸蝕及全酸蝕技術的直接或間接式覆復。做為廣用途黏著劑，本產品與光聚合式、自聚合式及光聚合式／自聚合式雙效複合樹脂都具有完整的適配性。
2. 本產品增加聚合樹脂材質（樹脂黏合劑、丙烯酸樹脂及複合樹脂）與間接式覆復材質如：玻璃陶瓷（瓷牙）、氧化陶瓷（二氧化鋁及氧化鋁）、金屬（貴金屬及非貴金屬）和含無機填料樹脂材質的黏著力。
3. 本產品內含 Phosphoric acid monomer、Bisphenol A di(2-hydroxy propoxy) dimethacrylate (Bis-GMA)、Triethylene glycol dimethacrylate(TEGMA)、2-Hydroxyethyl methacrylate(HEMA)、MTU-6(thiouracil monomer)、Silane coupling agent、Peroxide、Borate catalyst、Acetone、Isopropanol 及純水。

用途

- 配合光聚合式、自聚合式及光聚合式／自聚合式雙效複合樹脂對前後牙的直接式覆復
- 不需要額外的處理劑，進行口內修復複合樹脂覆復物、鑲嵌於金屬的瓷牙、金屬及所有的陶瓷覆復物
- 搭配光聚合式、自聚合式及光聚合式／自聚合式雙效樹脂黏合劑使用，黏合間接式覆復物及牙貼片
- 冠心材建構的冠心之黏著
- 將假牙樹脂黏著於金屬基底、牙鉤或精密連接體
- 修復具有金屬基底、牙鉤或精密連接體的假牙
- 在製作樹脂面牙冠時，黏著不透明樹脂層至金屬基底。

禁忌症

1. 本產品內含甲基丙烯酸單體、有機溶劑及酸。對甲基丙烯酸單體，甲基丙烯酸相關單體，對有機溶劑或酸過敏的病患不可使用本產品。

警告及注意事項

1. 除了上述列舉的情況，本產品不可用作其他任何用途。本產品僅能按照規定使用。
2. 本產品只出售給擁有牙醫執照的專業人士並供他們使用，不對非專業的牙科醫護人員出售，也不適合他們使用。
3. 若安全封條被破壞或有篡改過的痕跡時，請勿使用本產品。
4. 若本產品引發過敏反應，請立即停止使用。
5. 接觸本產品時皆需使用檢查手套（塑膠，乙烷基或者乳膠）以避免甲基丙烯酸單體可能引發的過敏反應。注意某些物質/材料有可能穿透檢查手套。本產品穿透檢查手套時，請脫下手套扔掉，並馬上用清水徹底清洗雙手。
6. 避免本產品與眼睛，粘膜，皮膚以及衣物的接觸。
 - 如果本產品誤入眼內，要立即用清水徹底沖洗並馬上諮詢眼科醫生。
 - 如果本產品接觸粘膜或皮膚時，要立即擦拭患處，在覆復後用清水徹底沖洗。由於蛋白質凝固，患處可能出現白化，但白化組織應會在 24 小時內消失。若白化組織於 24 小時內尚未消失，要立即與醫生聯繫。醫生對患者應盡告知之責。
 - 如果本產品接觸粘膜時，要立即擦拭患處，在覆復後用清水徹底沖洗。由於蛋白質凝固，患處可能出現白化，但白化組織應會在 24 小時內消失。若白化組織於 24 小時內尚未消失，要立即與醫生聯繫。醫生對患者應盡告知之責。
 - 如果本產品接觸皮膚時，要立即以酒精棉球或紗布擦拭患處後用清水徹底沖洗。
 - 如果本產品粘到衣物上，要立即用酒精棉籤球或紗布擦拭後用清水沖洗。
 - 治療後請患者馬上漱口。

7. 本產品不可以吞食或者吸入。攝入或者吸入會引起嚴重傷害。
8. 為防止不慎吞食本產品，請勿放置於病人及孩童可接觸到的場所。
9. 由於本產品是易燃品，不可將它及其蒸汽暴露在火源下。
10. 為避免交叉感染或降低黏著力，本產品包裝盒內的單次性塗藥器及拋棄式攪拌皿不可重複使用。攪拌皿於每次使用後徹底用酒精清洗。
11. 請勿於牙髓腔端點使用本產品。此部位適用玻璃離子黏合劑打底或以氫氧化鈣保護牙髓腔。
12. 因咬合不正或磨牙症（咬牙、磨牙或攻牙）造成的牙齒碎裂，鑲復後仍可能會再度碎裂。
13. 請勿使用其他廠牌的攪拌皿。
14. 施用及混合本產品請使用隨附之攪拌皿或拋棄式攪拌皿。若本產品不是調劑於橡皮之上，將會難以自攪拌皿上清除。將橡皮外翻可清除已具合之本產品。
15. 請勿將本產品與他牌處理劑或黏著劑一起使用。
16. 為避免液體濺出，自冰箱取出本產品時請勿立即打開瓶蓋。本產品應於室溫下使用。自冰箱取出後，請靜置 20 分鐘，直到產品溫度到達室溫。

藥品及材料的注意事項

1. 一些材料和藥品（止血溶液）即使在使用清水徹底清洗後仍會在長時間內抑制本產品的固化。含有下列成分的產品請勿使用。
 - 丁香酚
 - 氯化鋁
 - 硫酸鐵
 - 硫酸鈣
 - 硫酸鋁
 - 氟化銀【分子結構式： $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{F}$ 】
2. 牙齒經過含下列材料處理後，本產品不會立即與牙齒結構黏著。
 - 過氧化氫（雙氧水）
 - 次氯酸鈉建議進行黏合當日，請勿使用以上兩類材料。這兩類材料經常用作根管治療的抑制劑，通常需要 5 天才會揮發。

保存

1. 本產品須冷藏在 0 到 10°C (32 to 50°F) 的場所。
2. 避免陽光直射，遠離熱源，火花和明火。
3. 超過管上/瓶上/包裝上所標明的保存期限後請勿使用

處置

未使用的產品要以紗布或棉等惰性吸水材料吸收，並按當地規定進行處理。

型號、規格

PALFIQUE UNIVERSAL BOND KIT

5mL BOND A x 1
5mL BOND B x 1
Mixing Well x 1
Disposable Mixing Well x 1
Disposable Applicator (Fine) x 25

PALFIQUE UNIVERSAL BOND A

5mL BOND A x 1

PALFIQUE UNIVERSAL BOND B

5mL BOND B x 1

Disposable Mixing Well

50 pcs

製造廠名稱：Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory

製造廠地址：26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255, Japan

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：「依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載」