

“德山” 砂瑪 快速光固化複合樹脂

“TOKUYAMA” ESTELITE Σ QUICK Resin-based Dental Restorative Material

衛署醫器輸字第 019732 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

- 1) 本產品是一種次微米充填的光固化複合樹脂。本產品含82% (重量百分比) / 71% (體積百分比) 的矽-鋁次微米球形填料。採用這種特殊的填料，可降低樹脂的收縮率。本產品內的無機填料均為球形次微米填料 (充填粒子平均為 0.2 μm ; 充填粒子顆粒大小的範圍: 0.1 ~ 0.3 μm)，這種球形次微米填料提高了樹脂的表面光亮度與耐磨性。單體基質包含有雙酚A聚合物 (Bis-GMA) 與二甲酸三甘醇 (Triethylene glycol dimethacrylate)。
- 2) 本產品內含超活化光聚合起始劑(RAP)技術，於波長400-500 nm光照下可節省三分之一的聚合時間 (與前一代產品ESTELITE Σ 比較)。
- 3) RAP技術也提供了較長的操作時間。

適應症

- ◆ 適用於前後牙的牙體復形與牙齒咬合面填補。
- ◆ 複合樹脂貼面地直接黏合
- ◆ 牙間隙填補
- ◆ 修復盜牙/複合樹脂

禁忌症

本產品內含甲基丙烯酸單體。若病患對甲基丙烯酸單體敏感或有過敏反應時，請不要使用本產品。

注意事項

- 1) 應按照此說明書的使用方法來操作使用本產品。只可使用於此說明書內的牙科治療範圍，不可用於其他用途。
- 2) 本產品只能銷售給專業且有執照的牙醫師使用，此項產品不得銷售給一般個人使用。
- 3) 如果本產品的安全密封已經破損或其內容物有被更動過，請不要再使用。
- 4) 若因使用本產品而引起過敏反應或過度敏感時，應立即停止使用。
- 5) 為避免甲基丙烯酸相關的單體造成敏感或產生過敏反應，在使用本產品時請戴上手套 (塑膠、聚乙烯或乳膠手套)。某些特定的材料有可能會穿透手套，一旦發現有部分的產品穿透手套接觸到皮膚時，請立即將手套脫掉並丟棄之，同時儘快用清水清洗雙手。
- 6) 應避免產品接觸到眼睛、黏膜、皮膚及衣物。
 - 若不慎接觸眼睛，請馬上用清水沖洗，並立即送醫診治。
 - 若不慎接觸黏膜，請立即擦拭接觸區域，在置復後用清水沖洗。
 - 若接觸到皮膚或衣物，請立即以酒精棉球或棉片擦拭接觸區域。
 - 治療後，請患者立即以清水漱口。
- 7) 本產品不可經由口攝入或呼吸道吸入，攝入或吸入可能會對身體造成嚴重的傷害。
- 8) 要注意本產品的儲存/收藏，應避免病患或幼童拿取並誤食。
- 9) 使用後請用酒精徹底清潔填充器具。
- 10) 在使用光固化設備/儀器時，必須要佩戴眼睛防護罩、眼鏡或是護目鏡。

使用PLT的特別注意事項

- 1) PLT僅限單次使用，未用完請勿重複使用。
- 2) ESTELITE Σ 產品並未提供施用槍，請使用與 PLT尺寸吻合之施用槍。使用的施用槍必須可以用液體的消毒/滅菌液來浸泡與清潔 (專業的牙科消毒/滅菌/清潔流程)。
- 3) 請在室溫下使用本產品，因為冷藏會造成本產品的流動性降低，在使用上擠出不易。
- 4) 施用槍擠壓時勿施力過度，避免本產品溢流。

型號及規格

ESTELITE Σ Quick 3 Syringe Kit
Content: A2 x 1, A3 x 1, OA3 x 1

~~ESTELITE Σ Quick PLT Mini Kit~~ 註銷規格
~~Content: 0.2 g x 5: A1, A2, A3, OA2~~

ESTELITE Σ Quick Syringe Refill 107. 12. 19
Content: 2ml (3.8g)
顏色: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW, WE, CE

ESTELITE Σ Quick PLT Refill
Content: 0.2 g x 20 per Box
顏色: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW, WE, CE

製造廠名稱: Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory

製造廠地址: 26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255, Japan

藥商名稱: 傑基興業股份有限公司

藥商地址: 臺北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓